

EZMD

EASY MEDICAL DEVICES



Gebruiksaanwijzing EZ-Steunkouspistool[®] uit

Modelnr. 1001,300

Disclaimer

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Het gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} mag alleen gebeuren wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing geheel kent en begrijpt.

Easy Medical Devices en haar moedermaatschappij Van de Werve BV nemen geen verantwoording voor foutief gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} noch voor het gebruik van een zichtbaar of voelbaar defect of incompleet EZ-Steunkouspistool^{®uit}

Inhoudsopgave

Woord vooraf.....	4
Algemene Richtlijnen.....	5
Beschrijving EZ-Steunkouspistool®uit	6
Onderhoud.....	10
Conformiteitsverklaring	13

Woord vooraf

Het uittrekken van een steunkous gaat gemakkelijk met het Easy Steunkouspistool^{®uit}

Na enige oefening, het begrijpen en kennen van deze handleiding zult u merken hoe eenvoudig dit gaat.

We hebben in deze handleiding getracht zo volledig mogelijk te zijn en waardoor het stappenplan erg uitgebreid lijkt.

In de praktijk gaat het maar om zes stappen:

- voet plaatsen
- lepel naar boven,
- lepel achter kous haken,
- lepel met kous naar beneden.
- apparaat van u weg rijden
- been terugtrekken

Veel plezier met uw EZ-Steunkouspistool^{®uit}

Algemene Richtlijnen

Voordat u met het EZ-Steunkouspistool^{®uit} gaat werken zijn er een aantal algemene richtlijnen waar u zich altijd aan moet houden.

- Gebruik het EZ-Steunkouspistool^{®uit} nooit als u nog niet begrijpt hoe hij werkt. Lees de gebruiksaanwijzing goed.
- Bij het gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} dient u ervoor te zorgen dat u de lepel omhoog doet tot net in de knieholte. De lepel mag het been niet raken. In geen geval mag u pijn ondervinden of beschadiging oplopen. Als dat toch het geval is doet u iets verkeerd. Lees in dat geval (nogmaals) de gebruiksaanwijzing of vraag de leverancier om uitleg.
- Zorg voor goed en tijdig onderhoud volgens fabrieksvoorschrift door een Easy Medical Devices goedgekeurde onderhoudsdienst en zorg dat het apparaat niet nat wordt. Dit laatste kan kortsluiting veroorzaken en tot schade aan het apparaat leiden.
- Behandel het EZ-Steunkouspistool^{®uit} met beleid. Het hulpmiddel laten vallen of andere dingen er op laten vallen kan leiden tot beschadiging aan het apparaat.
- Voor vragen kunt u zich wenden tot uw leverancier of deze vraag mailen naar Customerservice@EZMD.nl

Beschrijving EZ-Steunkouspistool^{®uit}

- ① Plaats voor insteken van het oplaadapparaat.
- ② Bedieningsschakelaar voor AAN en UIT.
- ③ Keuzeschakelaar om de lepel omhoog/omlaag te doen en voor het blokkeren van het steunkouspistool.
- ④ Plek voor het plaatsen van de linker hand.
- ⑤ Plek voor het plaatsen van de rechter hand.
- ⑥ Lepel.
- ⑦ Voetplaat.
- ⑧ Extra handvat rechter hand. (Speciale uitvoering)

Met schakelaar ③ kiest u of de lepel naar boven of naar beneden gaat. Met de bedieningsschakelaar ② kunt u de lepel bewegen.



Gebruiksaanwijzing bij het zelfstandig uittrekken van steunkousen

Opmerking: Om het EZ-Steunkouspistool[®]uit zonder hulp te kunnen gebruiken, dient de gebruiker over voldoende romp- en armfuncties te beschikken. Het wordt aangeraden dit vooraf door een deskundige te laten beoordelen.

1. Zorg voor een comfortabele zithouding en voldoende werkruimte. Ga op een gewone eetkamerstoel of keukenstoel zitten waarin u prettig zit, waarbij het bovenbeen minimaal horizontaal staat.
2. Zet de lepel ⑥ als beginstand zo ver naar beneden d.m.v. bedieningsknoppen ②+③ dat er voldoende ruimte is in de knieholte. (Let op: als schakelaar ③ in de middenstand staat is de bedieningsschakelaar ② geblokkeerd)
3. Plaats uw voet op de voetplaat ⑦.




4. Doe de lepel ⑥ omhoog tot ca. 5 cm van de knieholte d.m.v. bedieningsknoppen ②+③.
5. Sla de boord van de steunkous zo dubbel als te zien is op de volgende foto:
6. Haak de lepel ⑥ achter de omgeslagen boord zoals te zien op onderstaande afbeelding en sla de kous terug over de lepel. Zorg dat de lepel volledig in de kous zit.



7. Doe de lepel ⑥ omlaag d.m.v. bedieningsknoppen ②+③ tot dat de lepel niet verder naar beneden kan. Zodra de lepel helemaal beneden is zal de beweging stoppen. Het apparaat maakt dan een licht ratelend geluid en de motor blijft gewoon lopen.

8. Laat de bedieningsschakelaar ② los zodra de machine helemaal beneden is. Het apparaat maakt een licht ratelend geluid. Hetzelfde geldt als het apparaat in de aller bovenste positie staat.
9. Plaats uw handen op de daarvoor bedoelde handvatten ④ en ⑤ of ④ en ⑥ en kantel zo het EZ-Steunkouspistool^{®uit} naar u toe. Strek nu uw been . (Zie onderstaande foto)
10. Duw het EZ-Steunkouspistool^{®uit} zo ver mogelijk van u af, en trek uw been terug zodra de hak voorbij de bovenkant van de schelp is. De steunkous gaat nu uit.

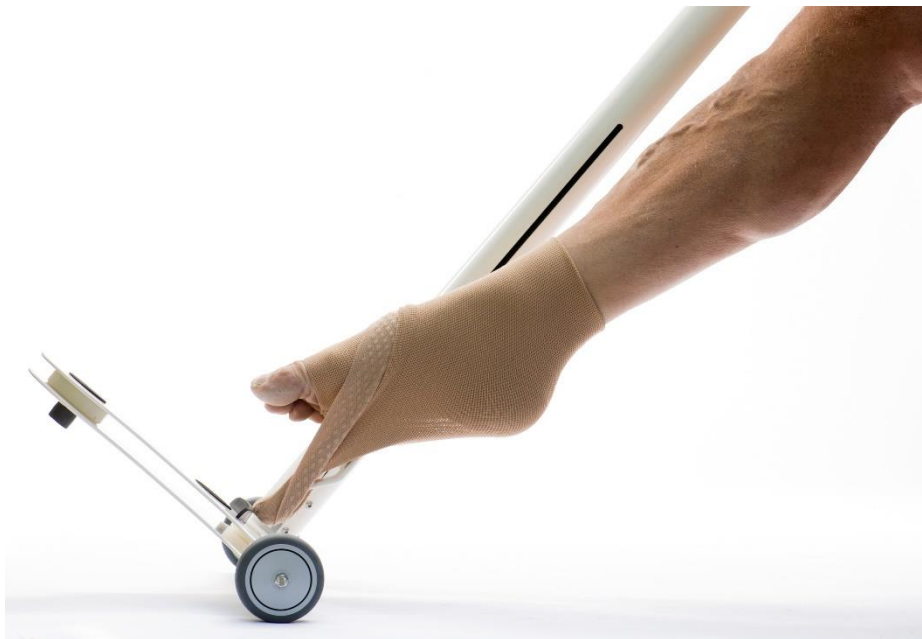

Onderhoud

Het EZ-Steunkouspistool^{®uit} is een mechanisch hulpmiddel dat enig onderhoud vereist.


Losnemen van de accu

Druk voor losnemen de blauwe knop op de accu in en schuif de accu van het apparaat. Terugzetten doet u door de accu op het apparaat te schuiven totdat deze vastklikt.



10

Voor het opladen van het EZ-Steunkouspistool[®] neemt u de accu los en steekt u de het kleine stekkertje in de laadpoort en steekt u de stekker in het stopcontact en let er op dat het witte lampje gaat branden. Dit lampje gaat continue branden zodra de accu opgeladen is.

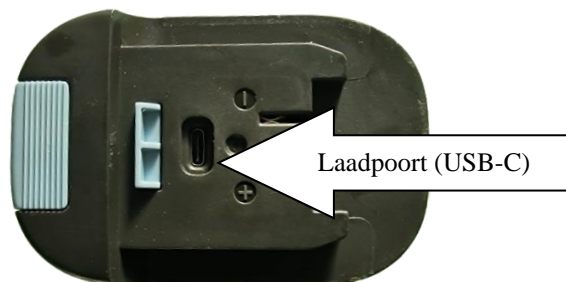

Omdat er Lithium-Ion accu's worden gebruikt mag u de accu aan de lader laten zitten ook wanneer deze helemaal vol is. Bij normaal gebruik zult u minimaal 10 keer een steunkous aan kunnen trekken met een volle accu.

Door op de blauwe knop achter op de accu te drukken kunt u de laadtoestand controleren.

3 lampjes = volledig opgeladen, 1 lampje = bijna leeg.

Gebruik voor het opladen een USB lader met maximaal 3A laadstroom bij 5V. (De meegeleverde lader is 2,4A bij 5V)

Dagelijks onderhoud

U kunt uw EZ-Steunkouspistool^{®uit} reinigen met een zachte doek met een beetje zeep, allesreiniger of alcohol. Zorg dat het apparaat goed afgedroogd wordt na het reinigen en dat er inwendig geen zeepresten of allesreiniger achter blijft.

11

Jaarlijks onderhoud

Jaarlijks adviseren wij dat uw EZ-Steunkouspistool^{®uit} gecontroleerd en onderhouden wordt door een door Easy Medical Devices goedgekeurde gespecialiseerde onderhoudsdienst. Deze zal het apparaat op defecten controleren, eventuele beschadigingen verhelpen, het apparaat smeren en de aandrijving onderhouden. Ook wordt het jaarlijks vervangen van de rubber lip geadviseerd. Dit onderdeel is aan normale slijtage onderhevig en is als verbruiksartikel los verkrijgbaar.

Garantie

Op het EZ-Steunkouspistool^{®uit} geldt een garantie van twee jaar. De voorwaarde voor deze garantie is het uitvoeren van de jaarlijkse inspectie en het jaarlijkse onderhoud door een door Easy Medical Devices erkende onderhoudsdienst. De garantie vervalt bij het niet en/of onjuist uitvoeren van het onderhoud en of het onjuist gebruiken van het apparaat.

Het apparaat dient voor garantie in een daarvoor aangewezen werkplaats aangeboden te worden.

Iedere poging zelf het apparaat te herstellen, uit elkaar te halen, te verbuigen, of anderszins te beschadigen doet de garantie vervallen.

Conformiteitsverklaring



CE Conformiteitsverklaring

CE Declaration of Conformity
CE-Konformitätsklärung
CE-Déclaration de conformité
Declaration no. EZMD-20240102-001

~~Wij, We, Wir, Nous,~~ Easy Medical Devices
Velperweg 114
6824 HM Arnhem
Netherlands

~~Verklaren dat het product,~~ Declare that the product, ~~erklären dass das Produkt,~~

Merk, Marke, make Easy Medical Devices
Type, Typ, EZ-Steunkouspistol[®] EZ-Compression Stocking Gun[®] EZ-
Kompressionsstrumpf Pistole[®]
Model, Modell 1001.300
Type ~~Steunkous uitrek hulp,~~ Compression stocking off device,
~~Kompressionsstrumpf Ausziehhilfe~~
Capacity CC2-CC4

~~Conform de volgende richtlijnen,~~ Is in conformity with the following directives, die
~~Conformes à la Directive, Europäische Richtlinien erfüllt, est conforme à la dispositions de la Directive~~

~~Richtlijnen~~ 2017-745 MDR

Testdocumente: VDW-20240102-001

Arnhem, 02-01-2024
L.R. van de Werve